

# Bruksanvisning

Ac3  
COMFORT®



1. Plasser flasken på et stabilt underlag og hold flasken i et fast grep. Ta av plasthetten.



2. Trykk hardt men forsiktig ned den blå ringen i ca 2 sekunder. Den hvite delen av applikatoren beveger seg da sakte oppover. (Viktig; må ikke holdes igjen!) Når du ser en ring rundt den hvite delen stopper du å trykke. Applikatoren er nå fylt og klar til bruk.



3. Løft ut den blå og den hvite delen fra applikatorholderen.



4. Før den blå og hvite applikatoren inn i endetarmen. Trykk forsiktig inn den hvite delen inn i den blå delen. Gelen er nå påført, og kan trekkes ut av endetarmen.
5. Ta applikatoren fra hverandre og skyll delene i varmt rennende vann. Gelen er uten olje og skylles lett av. Sett applikatoren tilbake i applikatorholderen på flasken.